


Protocole Dentotemp




Etape 1 : Préparation de la dent

Moignon dentaire

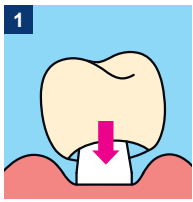


1 Essai et ajustement d'occlusion

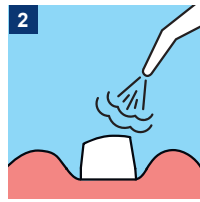


2 Sécher et isoler les surfaces préparées


Pilier implantaire

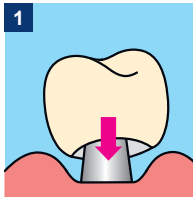

1 Essai et ajustement d'occlusion

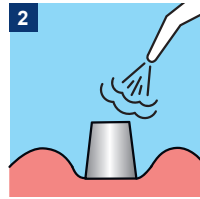


2 Sécher et isoler le pilier implantaire

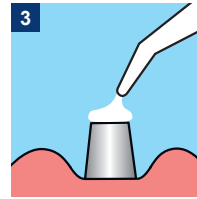

3 Appliquer une fine couche de lubrifiant à base d'eau

Facilite le retrait ultérieur.


Etape 2 : Préparation de la couronne

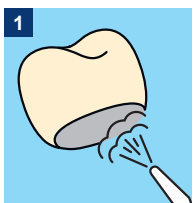


1 Nettoyer et sécher l'intrados

Etape 3 : Application du ciment


Dentotemp seringue automatique

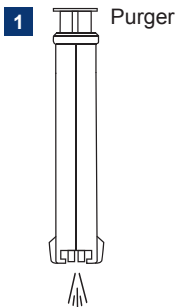

1 Purger

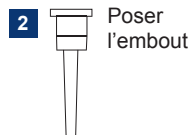

2 Poser l'embout

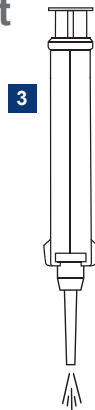

3 Repurger
Amorçage base/catalyseur.




4 Appliquer le ciment dans l'intrados

Le long de la paroi interne du tiers cervical de la restauration. Recouvrir complètement le bord.

Dentotemp seringue manuelle



1 Appliquer des doses équivalentes de base et catalyseur sur un bloc de mélange

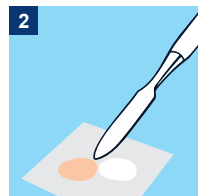


2 Mélanger pendant 20 à 30s




3 Appliquer le ciment dans l'intrados

Le long de la paroi interne du tiers cervical de la restauration. Recouvrir complètement le bord.

Etape 4 : Prise, Excès & Finition

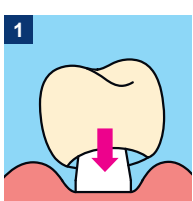


1 Positionner la couronne

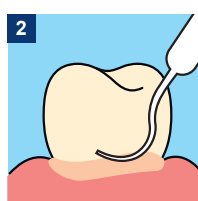


2 Maintenir jusqu'à la phase gel, puis retirer les excès

~ 2 à 2,5 min.

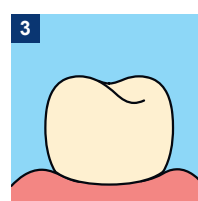

3 Compléter la prise en bouche

~ 4 à 5 min.

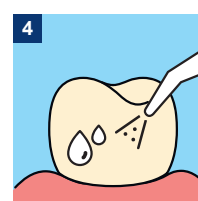


4 Rinçage, contrôle des marges et de l'occlusion

Dentotemp Protocol






Step 1 : Tooth preparation

Tooth abutment

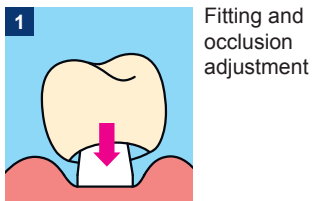

Implant abutment

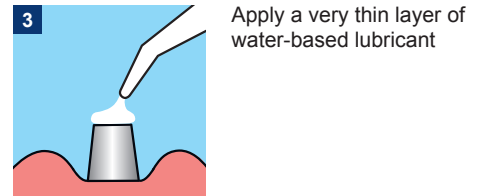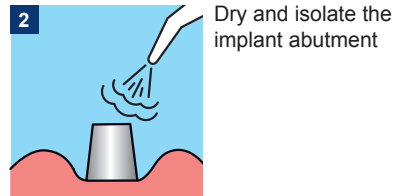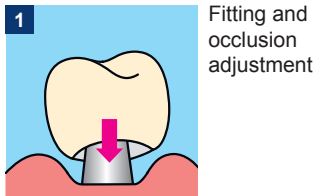





To make later removal easier.

Step 2 : Crown preparation






Step 3 : Cement application

Dentotemp automix syringe

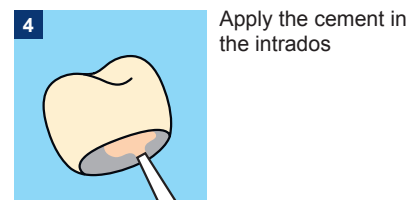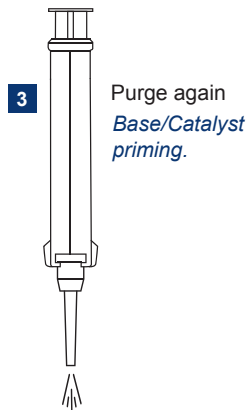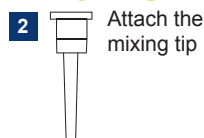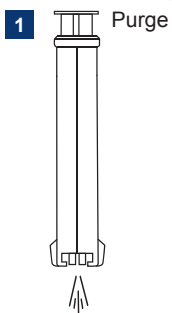



Along the internal wall of the cervical third. Coat the entire margin.

Dentotemp manual syringe

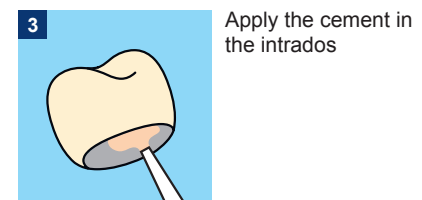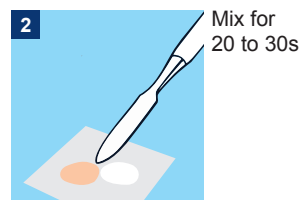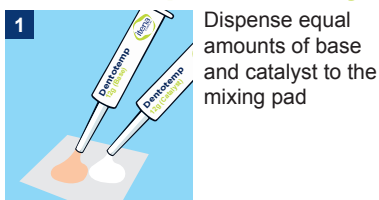


Along the internal wall of the cervical third. Coat the entire margin.

Step 4 : Setting, Excess & Finishing

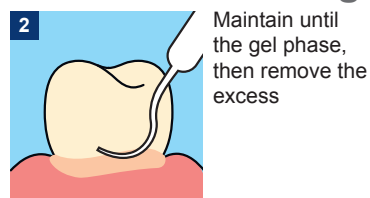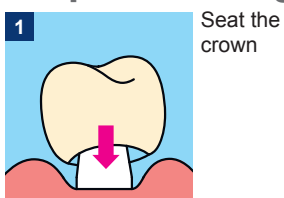

~2 to 2.5 min.

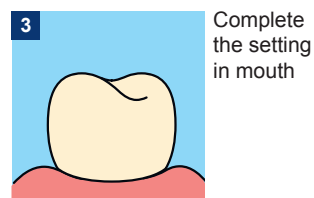

~4 to 5 min.

