



Een
algemene
score van
91%

CFPM
www.rs-dental-products.com/

Beschrijving

TURBOPRINT CLASS A R&S is een snelhardend, elastisch, stofvrij alginaat. Het is geschikt voor gebruik bij een breed scala aan afdrukprocedures in de standaard tandheelkundige praktijk. De totale tijd van de start van het mengen tot de verwijdering uit de mond is 2 min 40 sec, de intra-orale tijd bedraagt 1 min. Er is een gestandaardiseerde deeltjesgrootte ontwikkeld om te zorgen voor snelle waterabsorptie en een uniform, gladder, compact oppervlak. Het gieten van een afdruk kan enkele uren later plaatsvinden zonder dat de nauwkeurigheid van de afdruk in het geding komt mits de afdruk in een afgesloten zak wordt bewaard. Het product heeft een pepermuntsmak en is blauw van kleur. **TURBOPRINT CLASS A R&S** is verkrijgbaar in zakken van 500 g. Ongeopende zakken hebben een houdbaarheid van vier jaar. Negentwintig tandartsen beoordeelden **TURBOPRINT CLASS A R&S** door gedurende een periode van zes weken 361 afdrukken te maken. Dit product kreeg een klinische beoordeling van 91%.

Klinische tips

- Reiniging van het zachte weefsel is makkelijker als de huid en tong vochtig zijn en niet heel droog.

"GOED AAN TE
BRENGEN IN DE
AFDRUKLEPEL."

Commentaren van de consultants

- "Scheurvast."
- "De pepermuntsmak is niet heel sterk."
- "Ik zou graag een snellere uithardingstijd willen."

Productkenmerken

- 95% van de consultants beoordeelde **TURBOPRINT CLASS A R&S** als "even goed" of "beter dan" het alginaat dat ze momenteel gebruikten. Ze vonden dat het weinig stof produceerde, eenvoudig te bereiden en mengen van was en gemakkelijker naar een afdruklepel kon worden overgebracht.
- Een aantal tandartsassistenten merkten op dat het alginaat korrelig leek tijdens het mengen, maar dat dit geen invloed had op het eindresultaat.
- Patiënten vonden de milde smaak en geur prettig.
- Het materiaal zorgt voor een hoge mate van detail in de afdrukken en op de gegoten modellen.
- 67% van de tandartsen zou **TURBOPRINT CLASS A R&S** aanschaffen en 87% zou het aan collega's aanraden.

